



MADE TO STOP BLEEDING IN SECONDS²

CONTROLAR HEMORRAGIAS POTENCIALMENTE MORTALES CON CELOX™ RAPID

Las hemorragias no controladas son responsables de más del 35 % de las muertes prehospitalarias¹

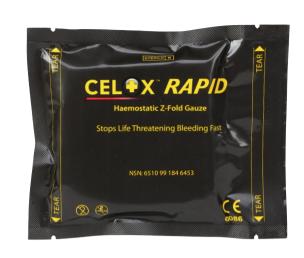


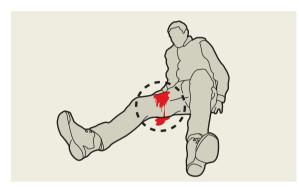

1. Identifique la hemorragia catastrófica




2. Exponga la herida: corte o rasgue las prendas que cubran la herida

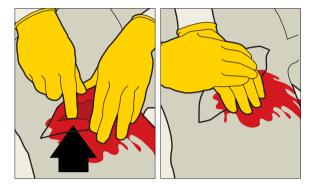

3. Identifique el punto de sangrado y aplique presión directa



4. Retire el exceso de sangre

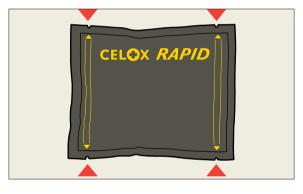

5a. Empaquete la fuente de sangrado: hay cuatro muescas de apertura, una en cada esquina



5b. Empaquete la fuente de sangrado: abra el paquete sin dejar de aplicar presión



5c. Empaquete la fuente de sangrado: siga empaquetando la herida, introduciendo Celox Rapid hasta rellenar la cavidad



6. Aplique una presión firme durante 1 minuto o hasta que se detenga el sangrado²


PIENSE EN LA **HEMORRAGIA** CATASTRÓFICA

<C> = Hemorragia catastrófica

A = Vías aérea

B = Respiración



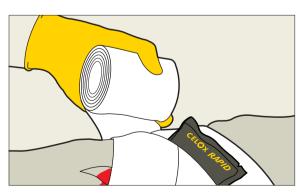

7. Asegure la zona con un vendaje



8. Traslade o derive a la víctima

1. Kauvar, D.S., Lefering, R., and Wade, C.E. (2006) Impact of hemorrhage on trauma outcome: an overview of epidemiology, clinical presentations, and therapeutic considerations. J Trauma 60, S3-11. 2. Celox Rapid está indicado para detener hemorragias potencialmente mortales con un tiempo de compresión de 60 segundos o hasta que el sangrado se detenga. Hoggarth A, et al. Testing a new gauze hemostat with reduced treatment time. Presentación de póster en ATACCC, Fort Lauderdale, agosto de 2011. Copyright © 2019 Medtrade Products Ltd. CELOX™ es una marca registrada de Medtrade Products Ltd. Todos los derechos reservados







