

ODTRHNITE

# CEL+X™ GAUZE

## Z-skladanáhemostatická gáza

Gáza v páse 1,5 m x 7,6 cm

### Určené použitie:

napoužitie vyškolenými pracovníkmi pohotovostných záchraných zložiek v prednemocničnom prostredí na dočasné ošetrenie urgentného, životohrozujúceho krvácania.

**Cieľová skupina pacientov:** dospelí a deti, s výnimkou novorodencov a dojčiat.

### NA DOČASNÉ VONKAJŠIE POUŽITIE



STERILE R



Nepoužívajte, ak je obal poškodený



Systém jed-nej sterilnej bariéry



Zdravotnícka pomôcka - Návod na použitie na zadnej strane



CE  
2797

ODTRHNITE

ODTRHNITE

ODTRHNITE

ODTRHNITE

ODTRHNITE

ODTRHNITE

ODTRHNITE

### Návod na použitie:



**1** Roztrhnúť motvortebalenie. Pred použitím zistíte hlavné miesto krvácania a priamo zatlačíte toto miesto, potom, pokiaľ je to možné, odstránite prebytočnú krv. Vyberte Z-skladanú gázu Celox a druhou rukou chyťte jeden z koncov.



**2** Pevne naskladajte neroztiahnutú Z-skladanú gázu Celox priamo na zdroj krvácania. Zvyšok rany obviažte Z-skladanou gázou Celox alebo štandardnou gázou na úrovni kože. Prebytočnú Z-skladanú gázu Celox môžete v prípade potreby odtrhnúť alebo odstrihnúť.



**3** PEVNE tlačte priamo na ranu počas 3 minút. Ak krvácanie pretrváva, ďalej tlačte na ranu ďalšie 3 minúty.



**4** Oviňte a pevne siiahnite obvazom, aby ste zachovali tlak na ranu.

**5** Všetku zvyšnú Z-skladanú gázu Celox zlikvidujte podľa miestnych štandardných protokolov pre biologický odpad.

**6** Onajskôr prepravte pacienta do zdravotníckeho zariadenia.

**7** Prázdny obal káždéz zdravotníckemu personálu.

### UPOZORNENIE PRE PERSONÁL ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA:

1. Fyzicky z rany odstráňte Z-skladanú gázu Celox a všetky voľne granuly na povrchu.
2. Celú oblasť rany zalejte úplne sterilným soľným výplachovacím roztokom.
3. Pokračujte normálnym výplachovaním a/alebo ošivovaním.
4. Pred začatím ošetrovania rany odstráňte z rany všetok produkt.
5. Odstráňte Z-skladanú gázu Celox a zvyšky zlikvidujte podľa miestnych štandardných protokolov pre biologický odpad.

**Trvanie použitia:** pomocou a zvyšky treba z rany odstrániť do 24 hodín od aplikácie.

**Varovania a upozornenia:** len na vonkajšie použitie. Nejedzte. Pripožítivypite pohár vody, aby ste sa vyhladili. Strata sterility predstavuje potenciálnu riziko infekcie. Opakovanenesterilizujte. Zabráňte vdychnutiu. Neaplikujte na oči. Ak dôjde k podráždeniu očí, vyplachujte oči vodou po dobu 5 minút. Ušchovajte mimo dosahu detí. Opakované použitie by mohlo viesť k riziku prenosu infekcií a k zníženému účinku. **Obsahuje chlórsan z kórovcov – štádiu na alergiu – preukázaná závažná reakcia. Údaje sú archivované v spoločnosti Medtrade Products Ltd.** **Kontraindikácie:** nepoužívajte pri poraneniach brucha a ranách, na ktoré nemožno zatlačiť. Nevkladajte to telesných dutín. Pomôckanie je určené na chirurgické použitie.

V prípade každej závažnej nehody spôsobenej pomocou alebo zariadením, ktorým sa výrobca a príslušný orgán v členských štátoch, v ktorom sa používateľ a/alebo pacient bydlisko.

Súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) pre pomocku je k dispozícii v európskej databáze zdravotníckych pomôcok (Eudamed), kde je prepojený so základným UDI-DI. Webová lokalita Eudamed je <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> a základný UDI-DI je 506020663BP0993020037.



Medtrade Products Ltd,  
Electra House, Crewe Business Park,  
Crewe, CW1 6GL, UK.  
[www.celoxmedical.com](http://www.celoxmedical.com)

UDI



Obelis S.A., Bd. Général Wahis 53,  
1030 Brussels, Belgium



**EU Importer:** MedEnvoy, Prinses  
Margrietplantsoen 33 – Suite 123,  
AM 2595 The Hague, The Netherlands



FG08838141  
Ref. ilustrácie: MTP-22-2463  
Dátum vydania: 11. máj 2021

CELOX™ is a trademark of Medtrade Products Ltd. All rights reserved.