

↑
16mm
+/- 2.0mm
↓

◀ ΣΚΙΣΤΕ

ΣΚΙΣΤΕ ▶

CELOX™ GRANULES

Αιμοστατικοί κόκκοι 15 γρ.

Προοριζόμενος σκοπός: Για χρήση από εκπαιδευμένο προσωπικό παροχής πρώτων βοηθειών σε προνοσοκομειακό περιβάλλον για την προσωρινή αντιμετώπιση επείγουσας, απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας.

Ομάδα ασθενών για την οποία προορίζεται: Ενήλικες και παιδιά, εξαιρουμένων των νεογνών και των βρεφών.

ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



STERILE R



MD



CE

2797

Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά

Σύστημα μονού στείρου φραγμού

Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Οδηγίες χρήσης στο πίσω μέρος

Οδηγίες χρήσης:

◀ ΣΚΙΣΤΕ

ΣΚΙΣΤΕ ▶



1 Φορέστε γάντια (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα). Ανοίξτε σκίζοντας τη συσκευασία του Celox.



2 Πριν από την εφαρμογή, εντοπίστε και ασκήστε άμεση πίεση στο κύριο μέρος της αιμορραγίας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το υπερβάλλον αίμα όπου είναι εφικτό.



3 Αδειάστε αμέσως ολόκληρο το περιεχόμενο από το σακουλάκι στο τραύμα. Επίστετε έως πάνω από το επίπεδο του δέρματος.



4 Εφαρμόστε ΣΤΑΘΕΡΗ πίεση απευθείας στο τραύμα για 5 λεπτά χρησιμοποιώντας γάζα. Εάν η αιμορραγία επιμείνει ή ξεκινήσει και πάλι, εφαρμόστε άμεση πίεση για 5 επιπλέον λεπτά. Επιρροδότε πακέτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο τραύμα ή για άλλα τραύματα που απαιτούν αμείωτα έκτακτης ανάγκης.



5 Τυλίξτε και δέστε τον επίδεσμο σταθερά, για να διατηρήσετε την πίεση στο τραύμα (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή).

6 Μεταφέρετε τον ασθενή σε ιατρικές εγκαταστάσεις το συντομότερο δυνατό.

7 Δείξτε την άδεια συσκευασία του προϊόντος στο ιατρικό προσωπικό.

8 Απορρίψτε τυχόν αχρησιμοποίητη ποσότητα σύμφωνα με τα τοπικά τυπικά πρωτόκολλα για βιολογικά απόβλητα.

ΥΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

- Το προϊόν είναι ένα εξαιρετικά απορροφητικό και διαλυτό αμύλο.
- Αφαιρέστε με φυσικό τρόπο την κρούστα γέλης από το τραύμα.
- Αφαιρέστε τυχόν χαλαρούς κόκκους επιφάνειας πριν από τον καταιονισμό.
- Βρέξτε καλά ολόκληρη την περιοχή του τραύματος με αποστειρωμένο αλκαλικό διάλυμα κατανοσοκομίου.
- Προσχωρήστε με τη συνθηματική διαδικασία κατανοσοκομίου και/ή αναρρόφησης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλο το προϊόν από το τραύμα πριν από την έναρξη της θέραιας.
- Απορρίψτε την κρούστα γέλης και τα υπολείμματα που έχετε αφαιρέσει σύμφωνα με τα τοπικά τυπικά πρωτόκολλα για βιολογικά απόβλητα.

Αδείαση χρήσης: Το ιατροτεχνολογικό προϊόν και τα υπολείμματα θα πρέπει να αφαιρούνται από το τραύμα εντός 24 ωρών από την εφαρμογή.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις: Μόνο για εξωτερική χρήση. Το προϊόν δεν τριτεύεται. Σε περίπτωση κατάστασης, πιέστε ένα παλιό υγρό για να αποφεύγετε τυχόν δυσφορία. Τυχόν απώλεια στερότητας ενέχει πιθανό κίνδυνο μόλυνσης. Να μην επαναποστειρωθείτε. Να αποφεύγετε τη στενωπή. Να μην εφαρμόζεται πάνω από το μάτι. Εάν εμφανιστεί ερυθρότητα στο μάτι, ξεπλύνετε με νερό επί 5 λεπτά. Να διατηρείται μακριά από το παιδί. Η αναπαραγωγή της θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιμόλυνση και μειωμένη απόδοση του προϊόντος. **Περιέχει χητοζάνη από οστρακοειδή.**

Μάτε επί αλλεργίας δεν έχουν δοθεί επαρκή στοιχεία.

Αδειάστε αμέσως σε αρχείο στην Medtrade Products Ltd.

Ανεπιθύμητες: Μην το χρησιμοποιείτε σε κοιλιακά τραύματα και τραύματα που δεν μπορούν να υποστούν πίεση. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε κοιλότητες του σώματος. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν προορίζεται για χειρουργική χρήση.

Οποιοδήποτε σφάλμα περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων (SPL) για το ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι διαθέσιμη στην ελαστική βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Euamed), όπου αναφέρεται με τον βασικό αναγνωριστικό κωδικό UDI-DI. Ο σκοπός της Euamed είναι <https://ec.europa.eu/tools/euamed> και ο βασικός αναγνωριστικός κωδικός UDI-DI είναι 5060206638F0993020037.

Medtrade Products Ltd,
Electra House, Crewe Business Park,
Crewe, CW1 6GL, UK
www.celoxmedical.com

EC REP
Obelis S.A., Bd
Général Wavès 53
1030 Brussels, Belgium

EU Importer: MedEnvy,
Prinses Margrietplantsoen
33 - Suite 123
AM 2595 The Hague,
The Netherlands

REF
FG08830621
Αναρ. γραμμικών
στοιχείων: MTP-22-2441
Ημερομηνία έκδοσης: 10/Μαΐου/2021

UDI

CELOX™ is a trademark of Medtrade Products Ltd. All rights reserved.