

REPÄISE

# CEL+X™ RAPID

## Z-taiteltu hemostaattinen side

Yksi side 1,5 m x 7,6 cm

**Käyttötarkoitus:** tarkoitettu ensihoitajien käytettäväksi ennen sairaalaa hengenvaarallisen verenvuodon tilapäiseen hoitoon hätätapauksessa.

**Kohdepotilasryhmä:** aikuiset ja lapset, poislukien vastasyntyneet ja vauvat.

### VÄLIAIKAISEEN ULKOISEEN KÄYTTÖÖN



STERILE R



Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut



Yksittäinen steriilijärjestelmä



Lääkinnällinen laite



Käyttöohjeet takana



2797

REPÄISE

REPÄISE

REPÄISE

### Käyttöohjeet:



**1** Repäise pakkaus auki. Ennen käyttöä tunnista pääverenvuotokohta ja kohdista siihen suora painetta. Poista sitten liika veri mahdollisuuksien mukaan. Ota esiin Celox Rapid ja tartu Z-taitellun siteen päähän.



**2** Aseta purkautuva Celox Rapid -side tiukasti suoraan vuotokohtaan. Peitä loput haavasta Celox Rapid -siteellä tai tavallisella siteellä ihon päältä.



**3** Jos verenvuoto jatkuu, paina LUJASTI suoraan haavan päältä 1 minuutin ajan tai kunnes verenvuoto lakkaa.



**4** Ylimääräisen Celox Rapid -siteen voi repäistä tai leikata pois tarpeen mukaan. Kiedo ja sido sideharsolla, jotta haavaan kohdistuu paine.

**5** Hävitä jäljelle jäänyt Celox Rapid biojätteen paikallisten vakioprotokollien mukaisesti.

**6** Siirrä potilas hoitopaikkaan mahdollisimman pian.

**7** Näytä tyhjä pakkaus hoitohenkilökunnalle.



Medtrade Products Ltd,  
Electra House, Crewe Business Park,  
Crewe, CW1 6GL, UK.  
[www.celoxmedical.com](http://www.celoxmedical.com)

UDI



Obelis S.A., Bd. Général Wahis  
53,1030 Brussels, Belgium



**EU importer:** MedEnvoy, Prinses  
Margrietplantsoen 33 – Suite 123, AM  
2595 The Hague, The Netherlands



FG08839131  
Kuvaviite: MTP-22-2408  
Julkaisupäivä: 11. toukokuuta 2021

REPÄISE

#### TIEDOKSI HOITOPAIKAN HENKILÖKUNNALLE:

- Pösta Celox Rapid ja irraliset pintarakeet haavasta.
- Huuhtele koko haava-alue runsaalla steriillä keittosuolaliuoksella.
- Jatka normaalilla huuhtelulla ja/tai imulla.
- Varmista, että tuote on kokonaan poistettu haavasta ennen kuin aloitat haavan hoidon.
- Hävität irrotettu Celox Rapid ja jäänteet biojätteen paikallisten vakioprotokollien mukaisesti.

**Käytön kesto:** laite ja jäänteet on poistettava haavasta 24 tunnin sisällä asettamisesta.

**Varoitukset ja varotoimet:** Vain ulkoiseen käyttöön. Älä syö. Jos tuotetta on nieltävä, juo lasi vettä epämiellyttävien tunteiden välttämiseksi. Sterililyden menetys voi aiheuttaa infektoriskin. Älä steriloit uudestaan. Vältä tuotteen sisäänhengittämistä. Älä levitä silmiin päälle. Jos esiintyy silmä-ärsytystä, huuhtelee vedellä 5 minuutin ajan. Säilytä lasten ulottumattomissa. Uudelleenkäyttö voi johtaa risti-infektioon ja heikentää tuotteen vaikutusta. **Sisältää äyriäisiä/ saatavaa kitosaania – Allergiatutkimukset eivät osoita haittavaikutuksia. Asiakirja-aineisto Medtrade Products Ltd:ssä.**

**Vastaindikaatiot:** älä käytä vatsassa oleviin haavoihin tai haavoihin, joita ei voi hoitaa painamalla. Älä aseta kehon onteloihin. Laitetta ei ole tarkoitettu kirurgiseen käyttöön. Kaikki laitteeseen liittyvät väkavat tapaukset on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenmaan pätevalle viranomaiselle, jossa käytetään ja/tai potilas sijaitsee.

Laitteen turvallisuuden ja kliinisen suorituskyvyn tiivistelmä (SSCP) on eurooppalaisessa lääkinällisten laitteiden tietokannassa (Eudamed), missä se on linkitetty UDI-DI-perustunnistukseen. Eudamed-sivusto on <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> Basic UDI-DI-perustunnus on 50602063BP0993020037.

REPÄISE

REPÄISE

CELOX™ is a trademark of Medtrade Products Ltd. All rights reserved.